


# 1 charger le dentaleyepad

Avant sa première utilisation, le dentaleyepad doit être chargé pendant environ 3 heures. Pour cela, il faut le placer sur le dock de chargement et brancher le câble USB sur le bloc d'alimentation. Vous pouvez également brancher le câble USB directement sur le dentaleyepad. Le dentaleyepad s'allume automatiquement lorsque la tension minimale est atteinte. Continuez à le charger jusqu'à l'obtention de deux voyants verts sur l'indicateur de batterie. Lorsque le dentaleyepad est complètement chargé, l'animation de charge s'arrête et la led verte supérieure reste allumée en permanence.

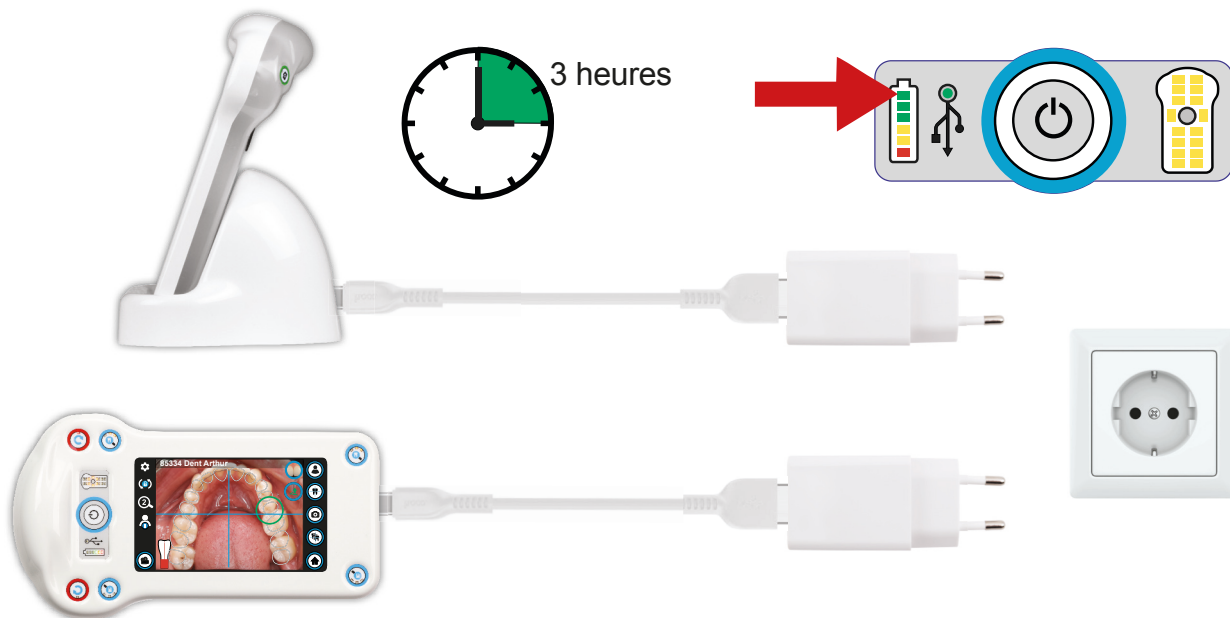

# 2 configuration du dentaleyepad

L'installation de la connexion dentaleyepad à votre PC s'effectue en trois étapes:

1. Installer le centre de contrôle dentaleyepad et lui attribuer une licence.
2. Transférer les données de licence et le connecteur sur le dentaleyepad
3. Établir une connexion wifi et définir le répertoire cible.

Pour ce faire, rendez-vous sur notre site Internet [www.dentaleyepad.de/fr](http://www.dentaleyepad.de/fr) et sélectionnez dans le menu « Service » (1) l'onglet « dentaleyepad installation » (2).

[dentaleyepad.de/fr/dispositif-dentaleyepad/](http://dentaleyepad.de/fr/dispositif-dentaleyepad/)

